

DentalSuite Nexta Opdatering 1.9 og 1.10 (13.10.22)


Denne opdatering indeholder funktionen "Skarphed" til billedredigeringsværktøjet samt udvidelse med gamma i henhold til støjreduktion.

Indholdsfortegnelse


Udvidelser til billedredigeringsværktøjet	2
Tilføjelse af gamma	2
Skarphed	3

Udvidelser til billedredigeringsværktøjet

Tilføjelse af gamma

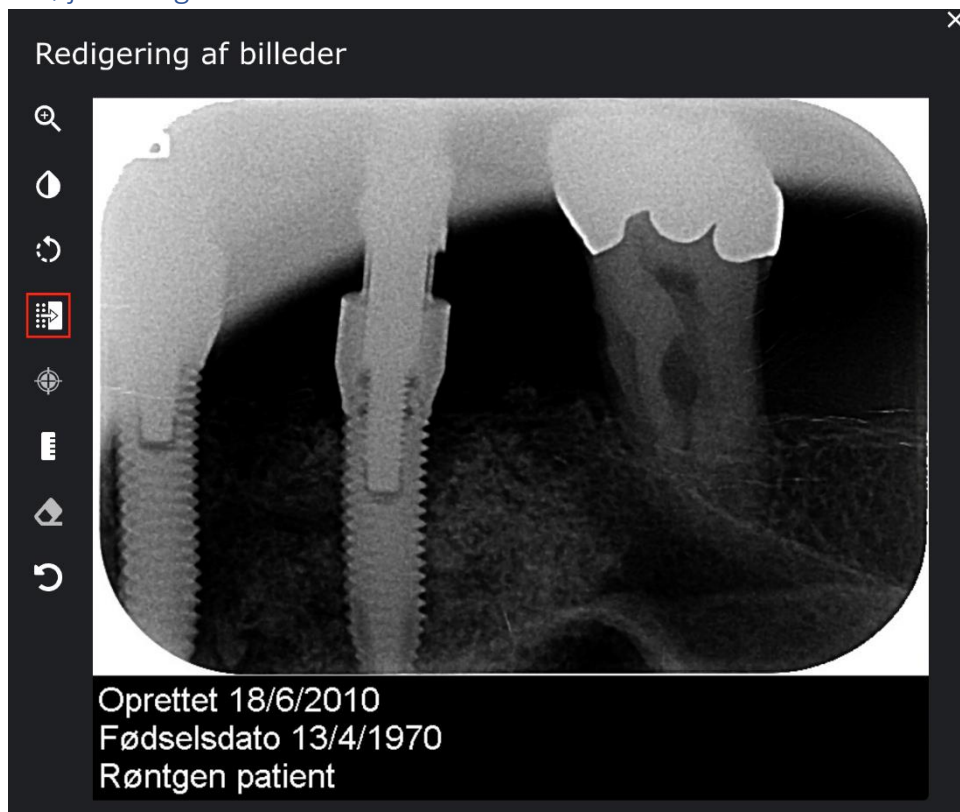


I henhold til funktionen til reducere af støj er denne udvidet så gamma nu kan anvendes.

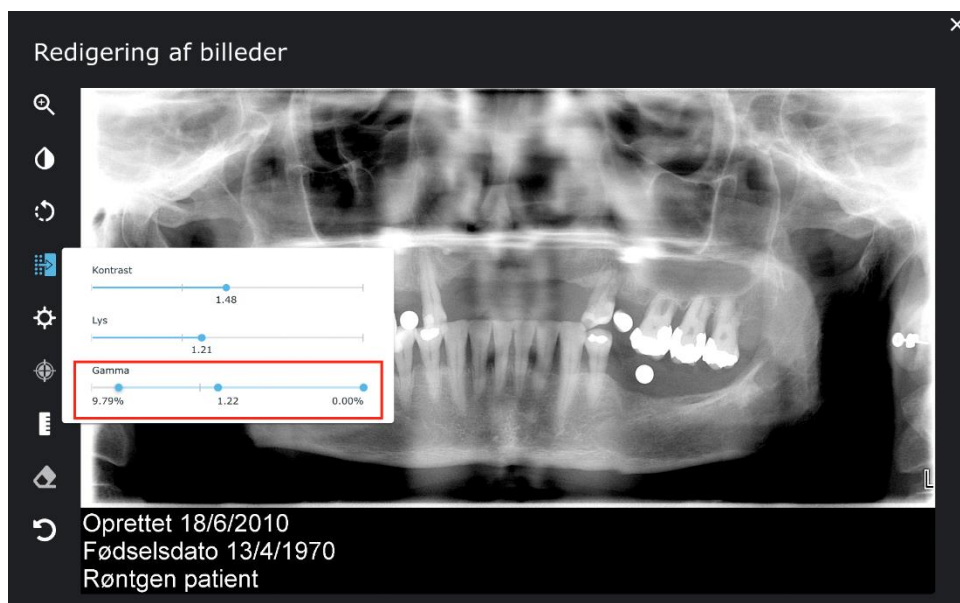


Gamma og de øvrige værdier kontrast og lys, ændres ved at rykke på de blå prikker.

Skarphed

Der kan foretages ændringer af billedets skarphed. Alle ændringer af skarphed vil automatisk blive gemt.

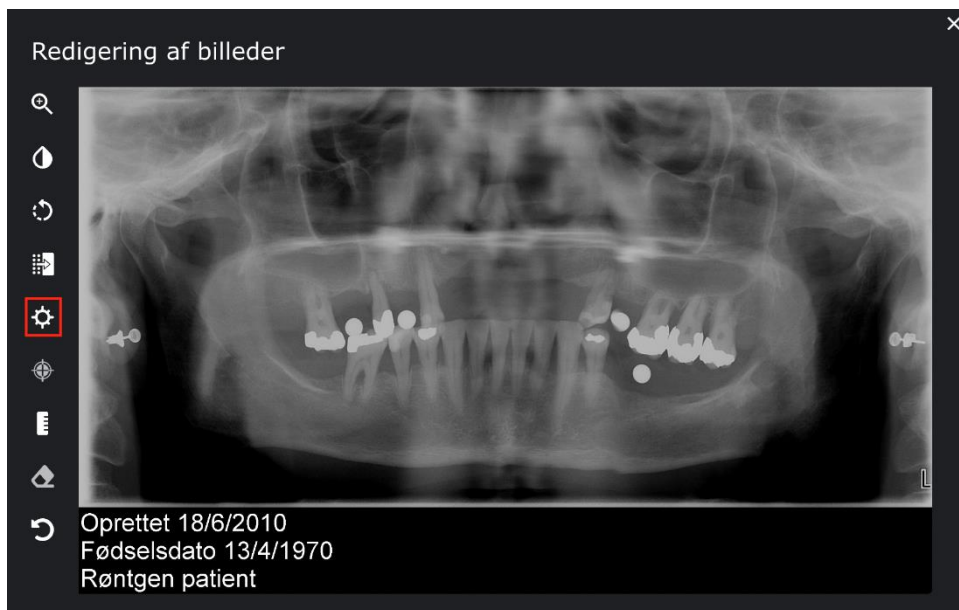

Ved at ændre i styrke og radius, ændres billedets skarphed.

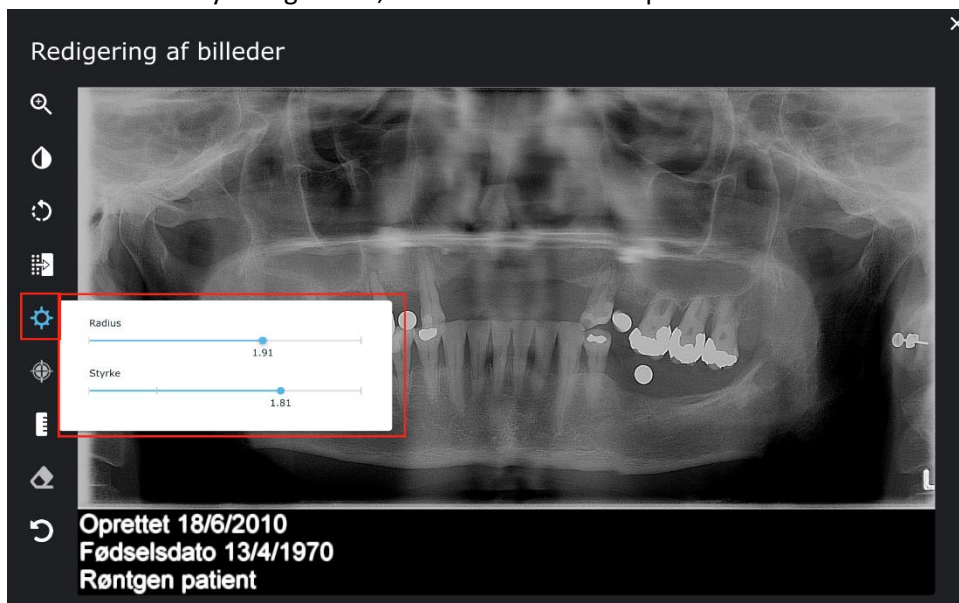

Ligesom ved støjreduktion, ændres værdierne ved at rykke på de blå prikker.